



הוראות שימוש



SilVet® היא תמיסת בופר היפרטונית, עם ריח נעים, לחיטוי, שמירת והוספת לחות וטיפול בפצעים. **SilVet®** היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל, 250 מ"ל ו 500 מ"ל.

שימוש יעודי והתוויות לשימוש:

SilVet® מיועדת לשימוש בבעלי חיים וחיות מחמד, על ידי או בהנחיית וטרינר, לשם חיטוי, טיפול, לחלוח והאצת ההחלמה של פצעים, כיבים שונים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה ראשונה ושנייה, חתכים, שריטות וגירוי עור קלים.

הוראות שימוש כלליות:

SilVet® מיועדת לטיפול ולחלוח פצעים וכוויות על ידי מזיגה של תמיסת **SilVet®** ישירות מהבקבוק, באמצעות מזרק פלסטי או במזרק כדור גומי, התזה על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי מזיגה על גזה / תחבושת או ספוג.

שטפו את הפצע עם **SilVet®** ונקו בעזרת גזה. ספגו גזה יבשה בתמיסת ה-**SilVet®** וחבשו איתה את הפצע. ניתן לכסות בתחבושת חצי אטימה למניעת התנדפות התמיסה.

חזרו על ההליך בתדירות של פעם-פעמיים ביום או פעם ביומיים, לפי הוראת הוטרינר.

תמיסת **SilVet®** אידיאלית לטיפול ביתי בפצעים ומהווה חלק אינטגרלי בערכת עזרה ראשונה, לטיפול בחיות מחמד ובעלי חיים אחרים. ניתן להשתמש בעד 10 מ"ל של תמיסת **SilVet®** לכל ק"ג משקל גוף בתוך 24 שעות.

יש להשתמש ב-**SilVet®** כפתרון עצמאי. ניתן לשטוף את הפצע במים או במי סבון לפני היישום. השימוש בכל פתרון אחר בשילוב עם **SilVet®** עשוי להפחית את יעילותו.

הערה: הפצע ניתן לניקוי אם **SilVet®** יושם בעזרת מחט 19G (לחץ השמה של ~10 psi). **אין להזריק** -המחט לא אמורה לגעת בפצע.

אזהרות והתראות:



- לשימוש חיצוני בלבד. המגע ממגע עם העיניים.
- השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק.
- הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.
- הימנע/י משימוש בתמיסה עכורה או בעלת צבע.
- הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע.
- בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר השימוש.
- לשימוש בחולה אחד בלבד.
- אחסן את התמיסה בטמפ' בין 10-30 מעלות צלזיוס (10°C-30°C).
- ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך 28 ימים מפתחת הבקבוק לראשונה, אם הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש.
- בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים.

הוראות שימוש



שלב 5:

לפני הסרת הגזה/החבישה או הספוג, יש להרטיב את החבישה עם סילוט להסרה קלה יותר




שלב 4:

הניחו את הגזה הספוגה על פצע, סגרו עם חבישה משנית חסימתית יבשה, לא אנטי-בקטריאלית, לפי הוראות החפא. את התמיסה ניתן ליישם באמצעות ריסוס הפצע מקבוק ספריי או ע"י התקן המיועד לשטיפה



שלב 3:

הרטיבו גזה מותנה סטרילית בתמיסת סילוט

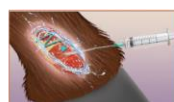

שלב 2:

שטפו את את כל שטח הפצע על ידי ריסוס סילוט מהמזרק. **אין להזריק**-המחט לא אמורה לגעת בפצע. הניחו לפצע להיחשף לתמיסה למשך 5-10 דקות.



שלב 1:

פתחו את מכסה הבקבוק. הכניסו מזרק עם מחט לתוך הבקבוק, והגדירו את הכמות של תמיסת סילוט על פי המלצת החפא

את התמיסה ניתן ליישם באמצעות מזרק פלסטי / טפטפת, ריסוס הפצע מבקבוק ספריי או ע"י התקן המיועד לשטיפה.

הערות:

- אין לשטוף את הפצע במי מלח/ תמיסת סליין, לפני או אחרי השימוש ב **Silvet®**
- אין להשתמש ב **Silvet®** יחד עם תמיסות הכוללות יוני כלוריד. יוני כלוריד נקשרים ליוני כסף ומשביתים אותם, מה שמפחית משמעותית את יעילות.

מרכיבים:

מים להזרקה (WFI), גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 20), טריס, מנתול וכסף ניטרטי 0.01% (w/v)

כל אריזה מכילה שניים עשר (12) בקבוקים של 500 מ"ל או 250 מ"ל, או עשרים וארבעה (24) בקבוקים של 100 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.

סמלים:

להלן תיאור הסמלים הגרפיים
המופיעים על תווית SilVet®:

זהירות	
היעזר/י בהוראות השימוש	 eIFU indicator
שמור/י את הבקבוקים הרחק מאור שמש ישיר	
מגבלת טמפרטורה	
לשימוש בחולה אחד בלבד, רב שימושי	
מעוקר על ידי שימוש בטכנולוגיית מילוי אספטי	
אין לעקר שנית. עיקור מחדש עשוי להפחית היעילות של המוצר	
אין להשתמש בבקבוק ניזוק	
להרחיק מהישג ידם של ילדים	
מחט G19 לחץ השמה של ~10 psi	 19-22G NEEDLE -10PSI
מכשיר רפואי	
קוד אצווה/ מס' סחורה	
תאריך ייצור מדינת ייצור	
השתמש/י לפני תאריך	
מספר קטלוגי	
יצרן	
מפיץ	
מזהה מכשיר ייחודי	



**SilverStream
Medical Ltd.**
Company Reg. No.
513160986
26 Shabazi St., Rosh
Ha'Ayin 4802126, Israel
Phone: +972 3 9194334
WWW.SIL.VET